



NEURO-TOX

Thiết bị dùng cho tiêm có hướng dẫn bằng EMG/Kích thích điện


HIỆU QUẢ TRONG SỰ CHÍNH XÁC

của việc xác định vị trí tiêm



- Thiết kế hai trong một: máy ghi EMG và máy kích thích điện
- Định vị vị trí tiêm bằng EMG tự phát hoặc kích thích điện
- Thiết kế cầm tay
- Điều khiển trực quan, dễ sử dụng
- Hiển thị EMG bằng âm thanh và hình ảnh

Khi hiệu quả điều trị phụ thuộc vào việc xác định chính xác vị trí tiêm thuốc, cần có thiết bị đặc biệt. Thiết bị cầm tay Neuro-Tox đảm bảo hướng dẫn nhanh chóng và chính xác dựa trên ghi EMG hoạt động của cơ đích hoặc đáp ứng cơ với kích thích điện. Chất lượng tín hiệu vượt trội ngăn ngừa việc xác định sai mục tiêu, trong khi giao diện trực quan cho phép làm chủ thiết bị ngay tại chỗ.

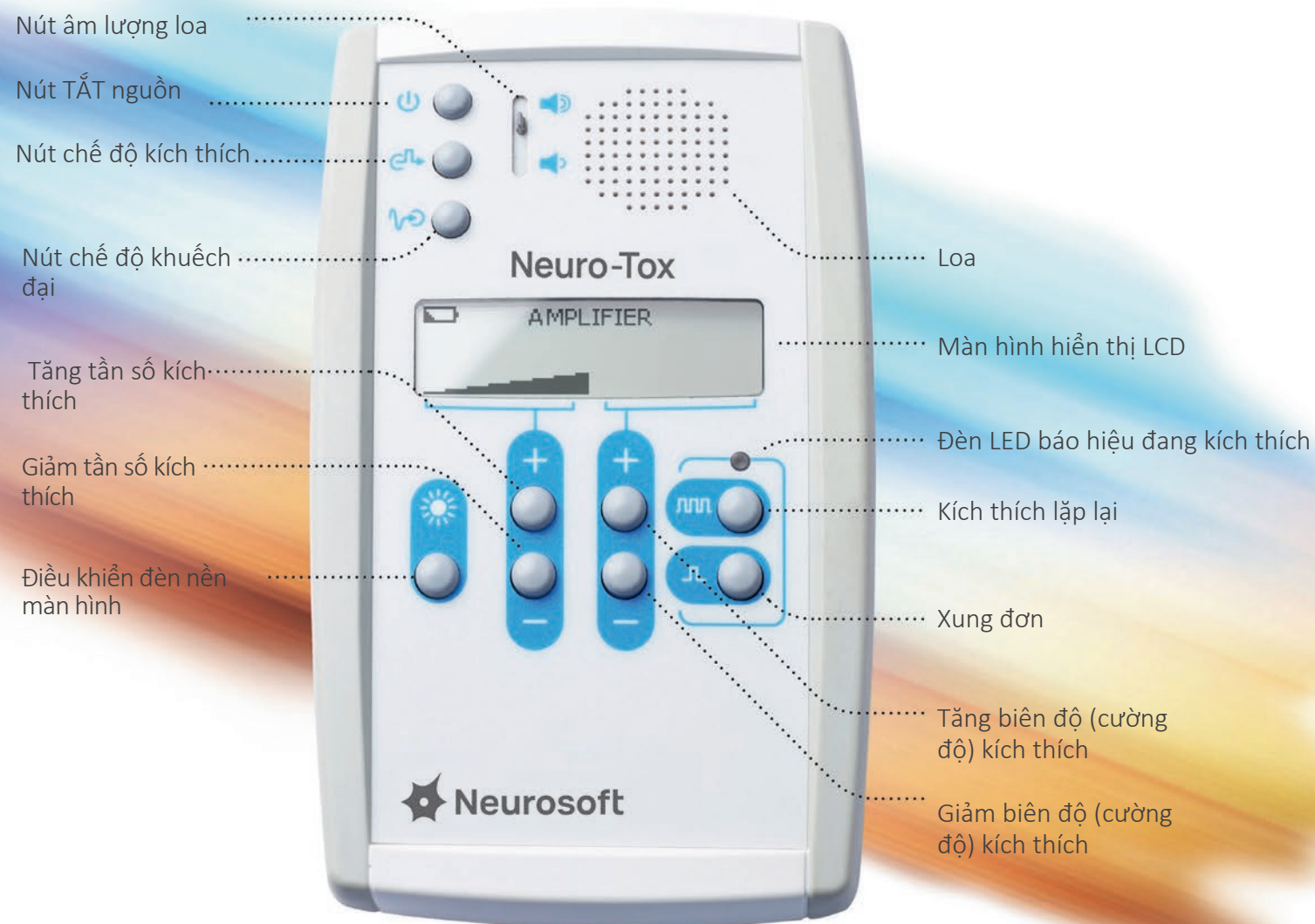


ỨNG DỤNG:

Loạn trương lực cơ khu trú: co thắt mi, loạn trương lực cơ cổ, chuột rút khi viết (writer's cramp), loạn trương lực cơ hàm miệng, biểu hiện của loạn trương lực cơ xoắn vô căn, lác

Phục hồi chức năng cho bệnh nhân bại não, đa xơ cứng, di chứng chấn thương sọ não, chấn thương tủy sống, đột quỵ

Hội chứng đau cơ xơ hóa và đau cột sống, đau đầu do căng thẳng, tăng tiết mồ hôi khu trú nguyên phát, nếp nhăn cơ mặt do cường chức năng

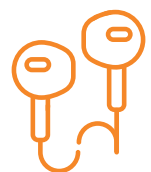

Cực kỳ dễ dàng xác định đáp ứng EMG qua âm thanh được tái tạo!

NEURO-TOX: KHI MỌI CHI TIẾT ĐỀU QUAN TRỌNG

Bộ phận điện tử Neuro-Tox được thiết kế để kết nối điện cực kim đặc biệt với bơm tiêm. Điện cực được đưa vào cơ. Khi bệnh nhân co cơ, tín hiệu EMG được ghi lại. Biên độ tín hiệu càng cao, đầu kim càng gần cơ đích.

Nếu bệnh nhân không thể co cơ, kích thích điện sẽ được sử dụng. Tất cả những gì bạn cần làm là tiêm đúng vị trí mục tiêu!



Âm thanh sẽ trở nên to hơn khi kim tiếp cận (chạm đến) cơ mục tiêu.



HỖ TRỢ TOÀN DIỆN VÀ TRỢ GIÚP KỸ THUẬT



Khi chọn sản phẩm của chúng tôi, quý khách có thể yên tâm và tin cậy vào sự hỗ trợ toàn diện từ các chuyên gia Neurosoft.



Cùng với thiết bị, quý khách nhận được hướng dẫn sử dụng chi tiết và hướng dẫn kỹ thuật.



Chúng tôi cung cấp bảo hành 24 tháng cho bộ phận điện tử và cập nhật phần mềm trọn đời.

KHI SỞ HỮU NEURO-TOX BẠN NHẬN ĐƯỢC:

- Bộ phận điện tử Neuro-Tox
- Bộ điều khiển từ xa
- Điện cực kim EMG dưới da dùng một lần
- Điện cực bề mặt dùng một lần
- Bộ sạc kèm pin sạc
- Cáp kết nối điện cực dùng một lần có nút bấm kẹp an toàn



www.neurosoft.com, info@neurosoft.com
Phone: +7 4932 95-99-99
5, Voronin str., Ivanovo, 153032, Russia