



aScreen

Thiết bị sàng lọc thính lực cầm tay



- Sàng lọc thính lực sử dụng kỹ thuật TEOAE và DPOAE
- Các mẫu kiểm tra dễ dàng tùy chỉnh
- Máy in nhiệt tích hợp
- Bluetooth để truyền dữ liệu Tương thích với Android

aScreen



Giao diện Bluetooth cho phép xuất dữ liệu từ thiết bị sang máy tính đã cài đặt phần mềm Neuro-Audio-Screen Manager.



Phần mềm Neuro-Audio-Screen Manager được cung cấp kèm theo thiết bị. Phần mềm này hỗ trợ quản lý và lưu trữ cơ sở dữ liệu bệnh nhân.



aScreen cũng có thể hoạt động với nhiều điện thoại thông minh và máy tính bảng chạy hệ điều hành Android có tính năng USB On-The-Go và cổng kết nối USB-C.

KHÁM NHANH VÀ CHÍNH XÁC CHỈ TRONG 4 BƯỚC:


1 Lựa chọn núm tai

Chọn núm tai có kích thước phù hợp và gắn vào đầu dò. Đưa đầu dò nhẹ nhàng vào ống tai bệnh nhân.




3 Nhận kết quả sau vài giây

Độ tin cậy tối đa của kết quả kiểm tra đạt được nhờ công nghệ loại bỏ nhiễu đặc biệt và công nghệ hiệu chuẩn chính xác, trong khi giao diện người dùng được thiết kế chu đáo đảm bảo hiệu suất cao và hợp lý hóa quy trình kiểm tra.

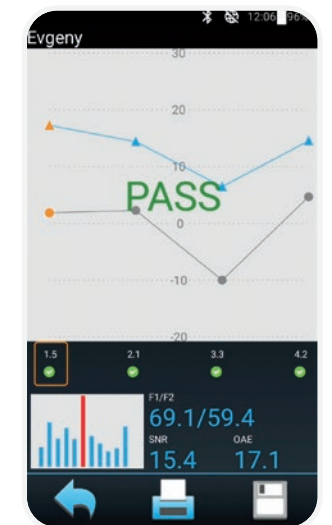

2 Lựa chọn kỹ thuật (TEOAE/ DPOAE)

Thực hiện sàng lọc thính lực bằng kỹ thuật phát âm thanh oto-acoustic thoáng qua (TEOAE) hoặc phát âm thanh oto-acoustic dạng biến dạng sản phẩm (DPOAE). aScreen đi kèm với một bộ mẫu được xác định trước đáp ứng các điều kiện ghi âm phổ biến nhất (Ồn - sàng lọc, Bình thường - sàng lọc, Yên tĩnh - sàng lọc). Sử dụng các mẫu này hoặc tự tạo mẫu riêng để đạt kết quả tốt nhất mọi lúc.

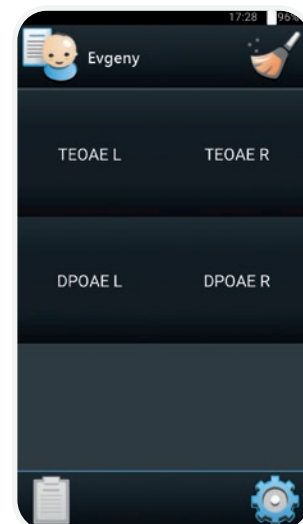

4 In kết quả một cách dễ dàng

aScreen không yêu cầu thiết bị bổ sung để in kết quả. Bạn cũng có thể in kết quả trên máy in tương thích với Android qua Wi-Fi hoặc trên hầu hết mọi máy in qua Cloud Print.



DÒNG SẢN PHẨM THÍNH HỌC NEUROSOFT

Neuro-Audio



ỨNG DỤNG

Máy phân tích ABR
& OAE lâm sàng

CÁC XÉT NGHIỆM

ABR, MLR, LLR, ECoG, VEMP, ASSR, multi-ASSR, P300, MMN, TEOAE, DPOAE

PHẦN CỨNG

Dựa trên PC

Audio-SMART



Máy phân tích ABR & OAE
chẩn đoán/sàng lọc và tai giữa

Tympanometry, AR, AR decay, ETF, TEOAE, DPOAE, AABR, ABR

Thiết bị độc lập cầm tay

aTymp



Máy đo nhĩ lượng

Tympanometry, AR, AR decay, ETF, ETF-2

Thiết bị đầu cuối di động hoặc dựa trên PC



www.neurosoft.com, info@neurosoft.com
Phone: +7 4932 95-99-99
5 Voronin str., Ivanovo, 153032, Russia



Up to 2-year
warranty



24/7 customer
support



Software
updates



Educational
videos